


Prélèvements histologiques (biopsies de col et d'endomètre, polypes, ...)

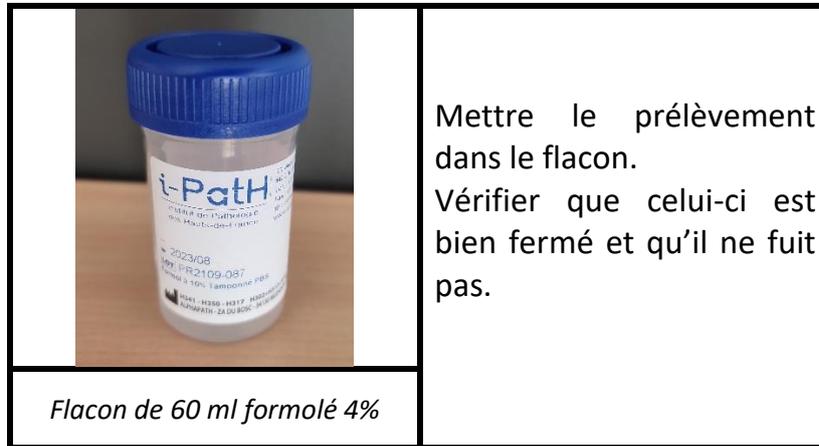


Prélèvements cytologiques (frottis cervico-utérins et test HPV)



NOTER l'identifiant de la patiente sur le flacon.

Ne rien mettre sur la partie sans étiquette du flacon.

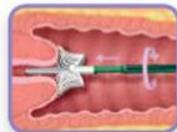

OBTENIR un échantillon adéquat. Pousser délicatement la brosse puis la faire tourner 2 fois à 360° dans le sens des aiguilles d'une montre.



RINCER le dispositif dans le flacon de solution en le pressant 10 fois au fond du flacon afin de séparer les poils. Secouer la brosse pour libérer le matériel résiduel.

Ne pas laisser la tête du dispositif dans le flacon.



VISSER le bouchon hermétiquement.

Ne pas serrer trop fort.



Dans le respect de notre démarche qualité et conformément à la réglementation relative au transport de matières dangereuses, **les flacons doivent être placés dans un emballage secondaire prévu à cet effet.**

Placer votre bon de demande d'examen dans la poche kangourou de ce sachet.